

BTL-6000 LYMPHASTIM

Технические параметры



BTL-6000
Lymphastim 12 TOPLINE



BTL-6000
Lymphastim 12 EASY



BTL-6000
Lymphastim 6 EASY

Интерфейс пользователя	Цветной 5.7 сенсорный экран	Светодиодные цифры	Светодиодные цифры
Число каналов	12	12	6
Установка давления	20 -160 мм Нг	20 -160 мм Нг	20 -160 мм Нг
Градиент	0 -100% непрерывная настройка	0, 10, 20, 30%	0, 10, 20, 30%
Запрограммированные протоколы	15	8	8
Энциклопедия BTL	26 клинических протоколов (последовательные программы)		
Программы пользователя	100 программ пользователя		
Аксессуары	10 камер для ног (правая и левая)	10 камер для ног (правая и левая)	5 камер для ног (правая и левая)
	штаны 22 камеры 2x для ног + пояс 2 камеры	штаны 22 камеры 2x для ног + пояс 2 камеры	для ног 11 камер 2x для ног+ пояс 1 камеры
	Для рук 8 камер (правая и левая)	Для рук 8 камер (правая и левая)	для рук 6 камер (левая и правая)
	Полоска для расширения 10 см для ног (для расширения окружности штанины)		
	Тележка		

BTL-6000 LYMPHASTIM

НОВАЯ СИСТЕМА ЛЕЧЕНИЯ BTL PRESSO-THERAPY ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ



sales@btlnet.com
www.btlnet.com


Все права защищены. Даже если были предприняты все меры по предоставлению точной и новейшей информации, автор этого каталога не будет нести ответственность за какие-либо ошибки или опечатки, содержащиеся в данном каталоге. Товары и их спецификации в этом каталоге могут изменяться без предупреждения.



ДРЕНАЖ ЛИМФЫ

Лимфатическая система отвечает за удаление тканевой жидкости из тканей. Она поглощает и транспортирует жирные кислоты и жиры к кровеносной системе и перевозит антиген-представляющие клетки к лимфатическим узлам, где стимулируется иммунная реакция. Болезни и другие проблемы лимфатической системы обычно вызывают увеличение объема или другие симптомы.

BTL Lymphastim работает по принципу пневматической прессотерапии. Специальные аппликаторы оснащенные несколькими специальными камерами обеспечивают нежный массаж который стимулирует природную циркуляцию лимфы через тело, подобно мануальному дренажу лимфы осуществленный руками массажиста.

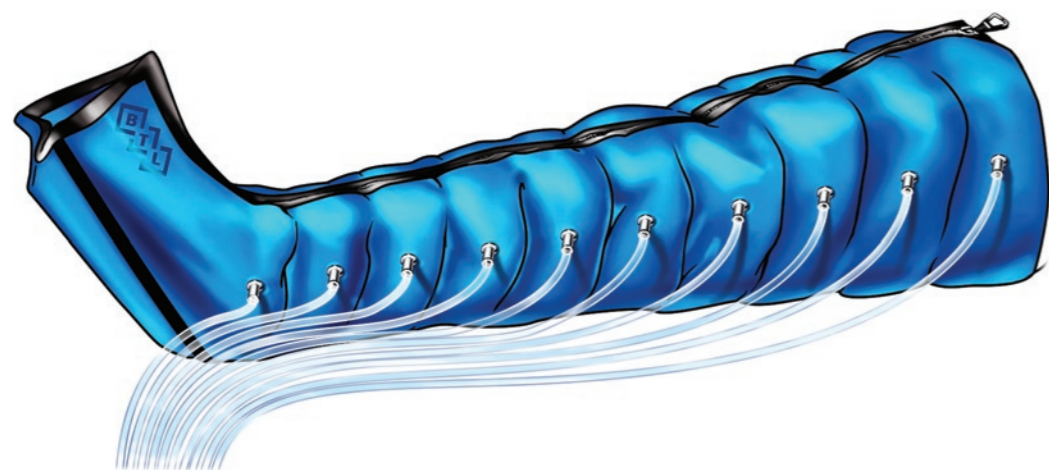


УДОБНЫЕ, ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АППЛИКАТОРЫ

- ◆ Полноразмерная застежка-молния для удобного применения



- ◆ Соединители для легкой смены аппликатора, просто включайте и начинаете лечение

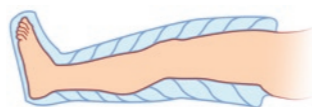

- ◆ Автоматическая идентификация аппликаторов



- ◆ Многочисленные аппликаторы с дополнительными застежками для расширения рукавов
- ◆ Гигиенические и стирающиеся
- ◆ Автоматическое опорожнение рукава после лечения – удобная рукоятка с аппликаторами
- ◆ Электронная система регулировки давления

BTL-6000 LYMPHASTIM 12 TOPLINE

12-канальное устройство для прессотерапии с:

- ◆ Удобный Цветной сенсорный экран 5.7 для пользователя
- ◆ Энциклопедия BTL с медицинскими и эстетическими протоколами
- ◆ Препрограммированные последовательности
- ◆ Память до 100 программ установленных пользователем
- ◆ Непрерывная регулировка давления 20 -160 мм Hg с установкой градиента
- ◆ Отдельная регулируемая давление для каждой камеры
- ◆ Расширенные настройки для специфического лечения
- ◆ Бесшумная и надежная работа компрессора
- ◆ Действие рабочей камеры выставляется на экран



**BTL-6000 LYMPHASTIM 12 EASY
BTL-6000 LYMPHASTIM 6 EASY**

12-канальный / 6-канальный устройство для прессотерапии с:

- ◆ 8 предварительно установленные программы для стандартных протоколов
- ◆ Непрерывная регулировка давления 20 -160 мм Hg с установкой градиента
- ◆ Бесшумная и надежная работа компрессора
- ◆ Действие рабочей камеры высвечивается на гистограмме
- ◆ Настройка скорости накачивания воздухом



САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПОКАЗАНИЯ

Медицинские:

- Хронические отеки
- Венозная недостаточность
- После-травматический уход
- Артроз
- Кистевой Туннельный Синдром
- Диабетическая ангиопатия
- Подагра
- Ишемическая болезнь нижних конечностей
- Альгодистрофический Синдром
- Ожирение
- Восстановление недостаточного производства MLD
- Трофические нарушения кожи

Красота/Эстетика

- Целлюлит
- Синдром тяжелых ног
- Предотвращение варикозных вен
- Улучшение трофической структуры кожи
- Жировой оттек
- Уход после липосакции
- Выздоровление
- Теналгия
- Регенерация
- Дезинтоксикация

